

PHILIPS



Guide d'utilisation de l'application mobile

DreamMapper

Mise à jour : Novembre 2016



Table des matières

Écran « Sommeil »	01
Comment naviguer	02
Modification des catégories de données	03
Pour en savoir plus sur le jour et la catégorie	04
Autres choix de menus	05
Écran « Flux »	06
Écran « Comprendre »	07
Onglet « Apnée »	07
Onglet « Équipement »	07
Onglet « Dépannage »	07
Écran « Objectifs »	08
Écran « Coaching »	09
Écran « Rappels »	09
Écran « Paramètres »	09
Onglet « Compte »	09
Onglet « Équipement »	09
Onglet « Préférences de contact »	09
Écran « Aide »	10
Onglet « FAQ »	10
Onglet « Support »	11
Onglet « À propos de »	11

Bienvenu(e)!

Bienvenu(e) sur DreamMapper de Philips.

Voici quelques conseils pour vous familiariser avec cette nouvelle application.

Arrivée sur la première page

Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur DreamMapper, l'écran «Sommeil» apparaît avec la date du jour par défaut. 3 catégories de données sont présentées : IAH, Utilisation et Ajustement du masque. Utilisation est la catégorie affichée par défaut. Le graphique situé en dessous reflète les valeurs de la catégorie sélectionnée pour une période de 7 jours incluant le jour affiché. Le jour actuel affiché est matérialisé en bleu foncé.



Comment naviguer

Pour changer la date, cliquer sur les flèches

Pour avancer ou reculer dans le temps, utiliser les flèches (“<”, “>”) situées à côté de la date. Lorsque vous changez de date, la barre surlignée en bleu foncée dans le graphique et les détails dans le bas de l'écran reflète la date sélectionnée. DreamMapper permet d'afficher les données de n'importe quel jour situé entre votre date d'inscription et la date du jour actuel.



Modifier la catégorie de données

Pour changer la catégorie et le graphique associé, cliquer sur la catégorie souhaitée.

La catégorie sélectionnée sera toujours en gras et Utilisation est la catégorie par défaut. Pour voir les informations sur l'IAH ou l'Ajustement du masque, cliquer sur le nom ou la valeur de la catégorie. Le pointeur en haut du graphique vous indique la catégorie sélectionnée.



Afficher les détails pour le jour et la catégorie


La partie basse de l'écran Sommeil montre des détails relatifs à la catégorie en cours de sélection.



Autres choix du menu

Pour naviguer dans les autres sujets du menu, taper sur l'icône menu hamburger

Pour voir le menu dans l'application mobile, taper sur l'icône situé en haut à gauche de votre écran. Lorsque vous aurez tapé, le menu apparaîtra, vous permettant d'accéder aux autres parties de l'application.

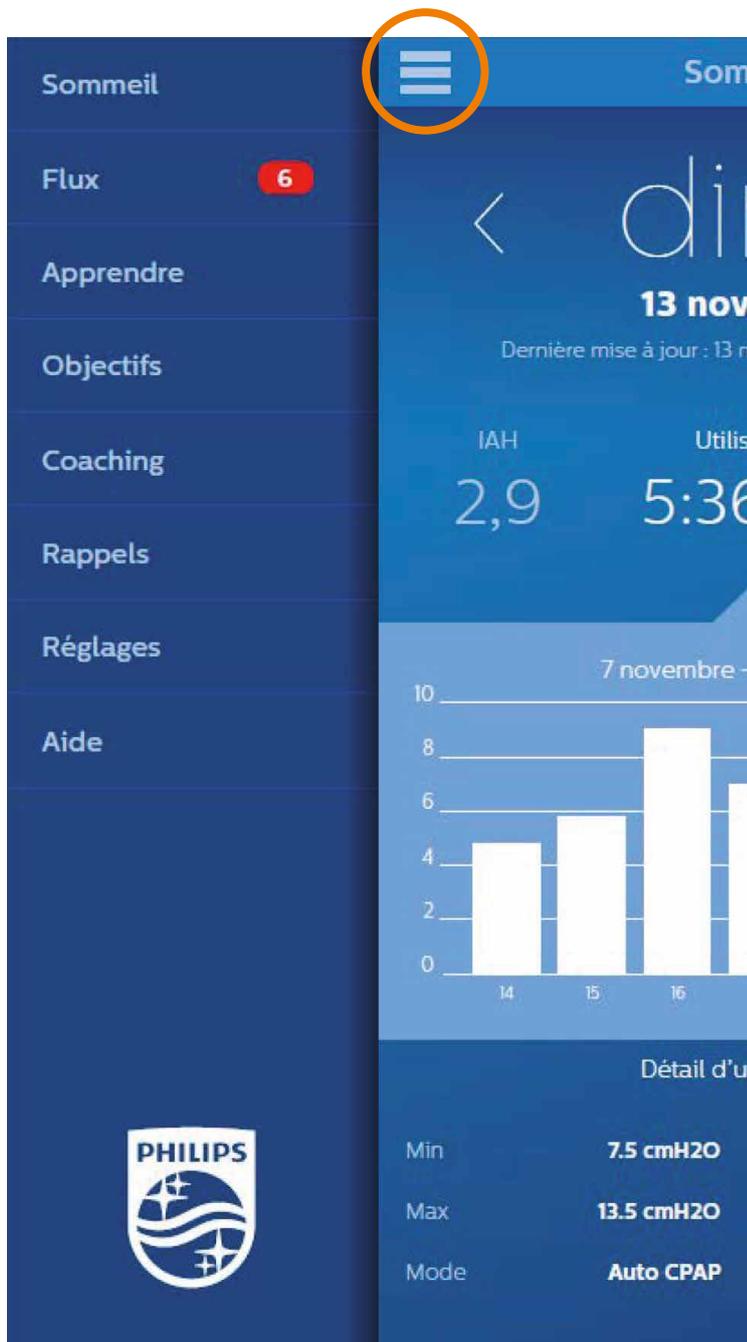

Écran « Flux »

La section « Flux » affiche les notifications qui ont été envoyées à votre compte : les rappels, alertes et recommandations.



Écran « Apprendre »

La section « Apprendre » comprend des liens vers d'autres informations utiles liées à l'apnée du sommeil, à l'utilisation de l'appareil et au dépannage.



Onglet « Apnée »

Cette page comprend des liens vers plusieurs vidéos présentant les causes et le traitement de l'apnée du sommeil.

Onglet « Équipement »

Cette page comprend des liens vers des vidéos et des guides en ligne liés à l'utilisation de l'appareil de traitement et DreamMapper.

Onglet « Dépannage »

Cette page contient des liens vers des vidéos présentant les difficultés liées au masque, à la pression de l'appareil, au dispositif, et les effets secondaires.

Écran « Objectifs »

L'écran « Objectifs » affiche plusieurs catégories d'objectifs mensuels et personnels.



Écran « **Coaching** »

Cette page comprend des liens vers des mini questionnaires et des vidéos sur la motivation, les risques cardio-vasculaires et vos impressions concernant l'apnée du sommeil et le traitement du sommeil.

Écran « **Rappels** »

L'écran « Rappels » vous permet de définir les intervalles de réception des rappels vous invitant à nettoyer votre masque, l'humidificateur, le tuyau et les filtres de votre appareil. Vous pouvez aussi programmer des rappels de suivi. Les rappels que vous programmez ici apparaîtront dans la section « Flux ».

Pour « activer » un rappel, cliquez sur son bouton . Le bouton change en : .

Ensuite, sélectionnez un intervalle de temps dans la liste déroulante pour le rappel.

pour un rappel de suivi, sélectionnez ou entrez une date dans l'espace prévu à cet effet.

Écran « **Réglages** »

La section « Réglages » comprend des informations rattachées à votre compte, vos préférences, votre masque et vos connexions de données.

Onglet « **Compte** »

Pour modifier n'importe quelle information relative à votre compte.

Onglet « **Équipement** »

Utilisez cette section pour préciser le masque que vous utilisez et recevoir des informations propres à ce masque. Vous retrouvez également le numéro de série de votre appareil et la fonction Bluetooth.

Onglet « **Préférences de contact** »

Cette section n'est pas applicable en France. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez souscrire à la newsletter via le site www.apneesommeil.fr

Écran « Aide »

La section « Aide » comprend des informations générales à propos de DreamMapper, de la terminologie concernant l'apnée du sommeil et le traitement du sommeil, ainsi que les informations de contact de Philips.



Onglet « FAQ »

Certaines des informations liées à DreamMapper et au traitement du sommeil vous sont peut-être nouvelles ou inconnues. Dans la section « FAQ » vous trouverez des définitions pour tous les champs affichés dans DreamMapper. Cliquez sur n'importe lequel des titres de catégorie montrés pour afficher leurs contenus.



Onglet « Support »

Si vous avez encore des difficultés à utiliser DreamMapper, utilisez les informations de contact affichées ici pour obtenir de l'aide. Nous souhaitons vous apporter pleine satisfaction avec DreamMapper.

Onglet « À propos de »

Cette section fournit l'usage préconisé de DreamMapper, les avertissements et mises en garde applicables, les définitions de symbole, la politique de mot de passe et les informations de contact supplémentaires de Philips.



www.philips.com

DreamMapper est une application et un site internet conçus pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d'apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement les instructions d'utilisation.

Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis

Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

Date de création : 11/2016