



PHILIPS

Apnée du sommeil

DreamStation Expert

Conçue pour offrir la meilleure
expérience patient



Ma DreamStation Expert...

La DreamStation est le fruit de 5 ans de Recherche et Développement. Plus de 700 études ont été menées auprès de patients et professionnels de la santé.

innovation ✨ you



Ma DreamStation Expert en 4 étapes

1 Installation

- Placer l'appareil près de votre lit.
- Relier le masque au circuit flexible de l'appareil.
- Relier l'appareil à une source d'alimentation 110/220 V.

2 Mise en route

- Appuyer sur le bouton  pour démarrer le traitement.
- La pression délivrée s'affiche à l'écran.
- Vous pouvez ajuster les réglages des accessoires.

3 Navigation

Utiliser le bouton rotatif pour parcourir et sélectionner les menus souhaités.



Mes infos
Affichage des données de traitement.



Préchauffage
Commande de l'humidificateur (si connecté).



Mon prestataire
Accès aux données pour l'équipe en charge de mon suivi.



Mes réglages
Modification de certaines options (humidification, rampe...).

4 Arrêt

- Appuyer sur le bouton  pour arrêter le traitement.
- Un bilan quotidien permet de visualiser l'évolution sur 3 nuits.

En savoir plus sur
www.apneesommeil.fr



Vidéo 360° des caractéristiques



Tutoriels vidéo de navigation et d'entretien



Série web humoristique



Application ludique "Mon passeport apnée du sommeil"

Choisir mon masque

Les masques Philips sont conçus pour améliorer le confort et s'adapter au quotidien des patients. Différents formats existent selon leur profil (port de lunettes, forme du visage, respiration nez+bouche...) et selon leur préférence.

De nouvelles solutions existent



Masque à contact minimal DreamWear, conçu pour oublier que l'on porte un masque.

Retrouver une liberté de mouvement



Masque naso-buccal Amara View, conçu pour ne laisser aucune marque rouge sur l'arête nasale.

Profiter d'un champ de vision dégagé

Éviter les irritations et les traces rouges.



S'intègre dans mon mode de vie

- **Sobre et moderne**, pour se fondre dans mon intérieur
- **Silencieuse**, pour ne pas me gêner moi ou mon conjoint
- **Petite et légère**, pour voyager facilement



Facilite mon adoption du traitement

- **Endormissement facilité** avec la SmartRamp Philips
- **Respiration plus naturelle** grâce à la technologie de confort P-Flex Philips
- **Confort d'utilisation** grâce à l'humidificateur Philips



M'accompagne et me connecte

- **Bilan quotidien**, pour visualiser mes progrès
- **Auto-diagnostic de l'appareil**, pour me rassurer sur le bon fonctionnement de l'appareil
- **Connectivité moderne**, pour une transmission simple de mes données de traitement



Efficacité clinique prouvée¹

-  Wi-Fi
-  Bluetooth®
-  Carte SD
-  Réseau cellulaire

...m'aide à **prendre mon traitement en main**

Références: 1. Equivalence of auto adjusted and constant continuous positive airway pressure in home treatment of sleep apnea. Nussbaumer et al, Chest 2006

DreamWear est un masque à contact minimal. Amara View est un masque naso-buccal. Ces masques sont destinés à servir d'interface patient dans l'application d'une thérapie PPC pour le traitement du syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) ou à deux niveaux de pression pour le traitement de l'insuffisance respiratoire.

Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution.

Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.



Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-Unis
Mandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne

© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com

Date de mise à jour : 08/04/2016