

Caractéristiques techniques



Sami le phoque
Générateur d'aérosol

Dimensions Environ 26,7 x 15,5 x 22,6 cm

Poids 1,58 kg

Garantie 5 ans



Tucker la tortue
Masque pédiatrique

Garantie 1 an



SideStream
Nébuliseur pour patient unique

Remplacer après 1 mois

Le nébuliseur SideStream permet une administration rapide, efficace et économique du médicament.^{1,2,3} Il est muni de la technologie à effet Venturi, ce qui donne lieu à des temps de traitement inférieurs à 6 minutes.*



* Avec 2,5 ml de salbutamol



[1] Hatley H. M., Potter R., Degtyareva Y. (2014). Measures of aerosol quality: respirable delivered dose and non-respirable delivered dose. *Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery*. 27. A22-A22.

[2] Shah PL, Scott S.F., Geddes D.M., Conway S., Watson A., Nazir T., Carr S.B., Wallis C., Marriott C., Hodson, M.E. An evaluation of two aerosol delivery systems for rhDNase. *European Respiratory Journal*. 1997 10;1261-1266.

[3] Nebulizer therapy. Guidelines. British Thoracic Society Nebulizer Project Group. *Thorax* 1997; 52 (Suppl. 2): S4-24.

© 2018 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Les spécifications techniques sont sujettes à modifications sans préavis. Respironics Inc. et Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd sont des filiales de Philips.

Sami the Seal, fabriqué par Philips, est un système de nébulisation à compresseur à air alimenté sur secteur qui procure une source d'air comprimée à des fins médicales. Il doit être utilisé avec un nébuliseur pneumatique qui produit des particules de médicaments sous forme d'aérosol pour l'inhalothérapie des patients (enfants et adultes). Le masque Tucker la tortue fabriqué par Philips est destiné à être utilisé avec les nébuliseurs de la gamme SideStream de Philips. Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le mode d'emploi fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Date de création : MLJ 01/01/2019. PN1923803


www.philips.fr/Asthme/Sami-le-phoque

PHILIPS

Asthme et
mucoviscidose

Thérapies pédiatriques
par nébuliseur

Rendez son traitement
plus amusant

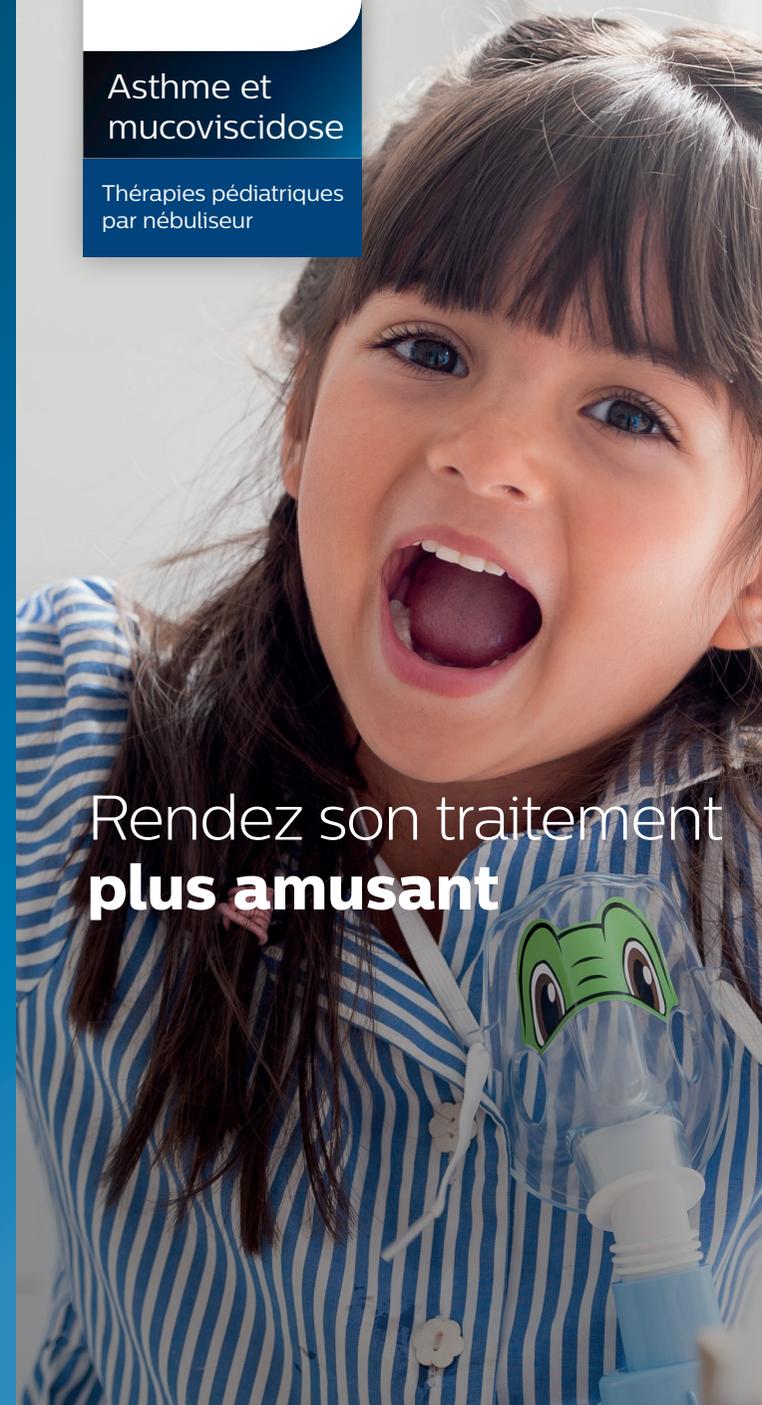

Qu'est-ce que la **thérapie par nébulisation** ?



La thérapie par nébulisation permet de traiter les maladies qui affectent les poumons et entraînent des problèmes respiratoires, comme l'asthme.

Lorsque votre enfant doit prendre un médicament liquide à inhaler, le nébuliseur transforme le liquide en brume fine : le médicament peut accéder plus profondément dans les poumons où il sera plus efficace.^{1,2,3}



Aider votre enfant à adopter son traitement

Avez-vous essayé de rapprocher les frontières entre temps de jeu et moment du traitement pour aider votre enfant à prendre son traitement contre l'asthme? Notre appareil de traitement contre l'asthme pour les enfants est ludique, convivial et, surtout, nébulise efficacement. Il y a donc plus de temps libre pour s'occuper de choses sérieuses de la vie, comme les aventures de pirates !



Sami le phoque

Un personnage créé avec amour qui offre à votre enfant des traitements fiables, rapides et faciles à utiliser en seulement 6 minutes.*



Tucker la tortue

Le masque Tucker, souple et flexible, a été conçu pour être confortable et s'adapter afin de réduire les fuites de l'aérosol autour des yeux.

Une utilisation simple au quotidien

Préparer l'appareil

1. Poser Sami the Seal sur une surface plane et stable.
2. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale.
3. Connecter l'une des extrémités du tuyau à la partie basse du réservoir du nébuliseur et l'autre extrémité sur Sami à la sortie d'air du compresseur.

Prendre le médicament

4. Préparer le réservoir du nébuliseur et y ajouter le médicament prescrit par le médecin.
5. Pour démarrer le traitement, tourner l'interrupteur d'alimentation vers la position « I ».
6. Pendant la durée du traitement, s'asseoir bien droit et se détendre.
7. Lorsque le traitement est terminé, tourner l'interrupteur d'alimentation vers la position « O » et débrancher Sami.

Nettoyer le compresseur

1. Débrancher Sami avant de le nettoyer.
2. Vérifier le filtre au moins une fois par semaine et le remplacer s'il est sale.
3. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer Sami. Le faire une fois par mois au moins.

Nettoyer le nébuliseur

1. Après chaque utilisation, démonter la partie supérieure du nébuliseur SideStream, le réservoir à médicament, le déflecteur et l'embout buccal.
2. Les laver dans de l'eau chaude savonneuse.
3. Les rincer à l'eau claire et froide. Bien les égoutter et les laisser sécher à l'air.
4. Une fois par semaine, faire bouillir pendant 10 minutes toutes les pièces (sauf le tuyau et le masque) dans de l'eau avec 2 à 3 gouttes de produit vaisselle.

Recommandations pour un traitement efficace^{1,2,3}

1. Pour aider votre enfant à obtenir le maximum de son traitement, remplacez le SideStream patient unique tous les mois.
2. Changez le filtre du compresseur au moins tous les 3 mois ou dès qu'il ne paraît plus blanc et propre.

Retrouvez les guides vidéo d'utilisation et de nettoyage du générateur Sami le phoque, du masque Tucker la tortue, et du nébuliseur SideStream sur www.philips.fr/Asthme/Sami-le-phoque

* Avec 2,5 ml de salbutamol