


### 3 Instructions

#### 1. Connexion d'une canule nasale à une sortie d'oxygène

- Connexion d'une canule nasale (1)
- Placez la canule nasale et respirez normalement par le nez (2).

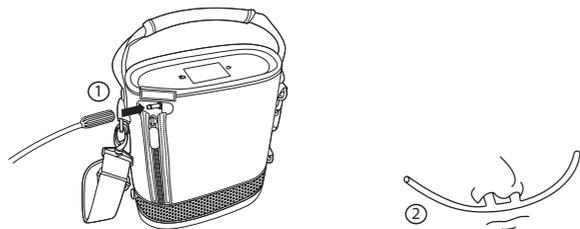

- Mettez l'appareil sous tension comme décrit dans la section suivante.


Remarque : L'appareil fonctionne avec une tubulure de canule de 3 m maximum.

#### 2. Démarrage/Arrêt du SimplyGo Mini

- Allumez l'appareil en appuyant deux fois sur dans un intervalle de 5 secondes.

Remarque : L'appareil démarre automatiquement au taux de débit d'oxygène utilisé la dernière fois qu'il a été éteint.

- Éteignez l'appareil en appuyant sur . Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, appuyez une seconde fois pour éteindre l'appareil.

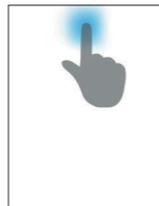

Remarque : Si vous n'appuyez pas une seconde fois sur le bouton d'alimentation, l'écran d'accueil s'affiche à nouveau.

#### 3. Visualiser le nombre d'heures d'utilisation du SimplyGo mini :

- Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt, le nombre d'heure d'utilisation apparait alors sur l'écran d'accueil (heure : xxx) au-dessus de la version du software de l'appareil.



L'écran illustré ici affiche les informations suivantes :


- Réglage d'O<sub>2</sub>
- Autonomie de la batterie
- Nombre d'heures d'utilisation de l'appareil
- Version logicielle

L'écran s'éteint automatiquement après 5 secondes.

### 4 Réglages

#### 1. Accéder au mode de démonstration

- Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt.
- Au moment où le logo Philips Respironics apparait, appuyer sur l'écran en bas à droite pour activer le mode démonstration.

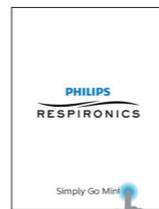

L'appareil affiche ensuite l'écran de démarrage avec un symbole « démo » encadré en jaune.

Ce mode permet à l'unité de désactiver des alarmes telles que l'absence d'alarme de souffle afin de faciliter la démonstration.

#### 2. Écran d'accueil

L'écran d'accueil comprend les éléments suivants :

Symboles	Description
	Icône Outils permettant d'accéder au menu Outils
2	Symbole du nombre représentant le réglage de débit
	Symbole du niveau de charge de la batterie




#### 3. Modification du réglage pour le débit d'oxygène

- Touchez le chiffre du réglage de débit sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Réglages de l'O<sub>2</sub>.
- Appuyez sur les boutons + ou - pour augmenter ou réduire le réglage d'O<sub>2</sub> de 1 – 5 par incréments de 1.



#### 4. Vérification de l'état de la batterie

- Touchez le symbole de niveau de charge de la batterie sur l'écran d'accueil pour accéder à l'écran Informations relatives à la batterie.
- Le chiffre du pourcentage de batterie et le symbole de niveau de la batterie indiquent la capacité de batterie restante.

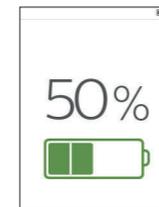

#### 5. Accès au menu Outils de l'appareil

- Touchez sur l'écran d'accueil pour accéder aux menus suivants : Informations sur l'appareil, Luminosité, Son de l'écran tactile, Journal des alarmes et Sélection de la langue.

Remarque : Utilisez < et > pour naviguer parmi les différents menus.

**PHILIPS**  
SimplyGo Mini



## Guide de réglages

- 1 Présentation
- 2 Mise en route
- 3 Instructions
- 4 Réglages

# 1 Présentation

**1. Bouton d'alimentation** - Allume et éteint le SimplyGo Mini.

**2. Panneau de commande** - Interface à écran tactile permettant de commander les fonctions. Affiche des informations relatives au statut du fonctionnement et aux réglages de l'appareil.



**3. Bouton Accueil** - Permet d'accéder à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

**4. Connecteur de canule** - Sortie d'oxygène et point de connexion pour la canule.

**5. Batterie rechargeable** - Batterie rechargeable standard ou longue durée.

**6. Connecteur d'alimentation** -

Point de connexion aux diverses sources d'alimentation externes : tension secteur, courant continu d'un véhicule.

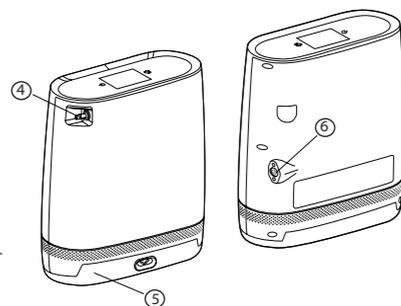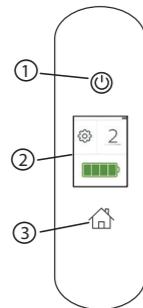


# 2 Mise en route

Ce guide est une aide au démarrage lors des premières utilisations du concentrateur d'oxygène portable SimplyGo Mini.

## 1. Introduction et retrait de la batterie

Vous pouvez utiliser une batterie standard ou de longue durée, les 2 types de batteries s'insèrent de la même façon.

- Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- Tenez l'appareil d'une main et de l'autre, faites coulisser la batterie dans le compartiment se trouvant sous l'appareil afin de l'insérer facilement. (1).
- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton d'éjection au milieu du compartiment de batterie. La batterie sort de son compartiment (2).

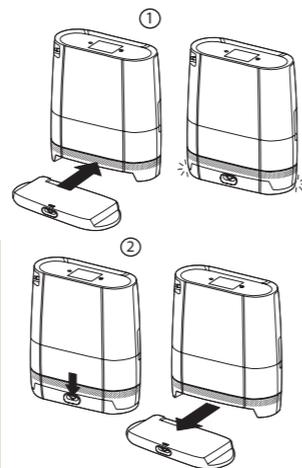


**Important :** La première fois que vous chargez la batterie, assurez-vous de la charger complètement. N'utilisez pas le cordon d'alimentation en courant continu pour la charge initiale ; utilisez plutôt l'alimentation secteur.

## 2. Charge de la batterie sur l'alimentation secteur

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, les batteries SimplyGo Mini nécessitent un temps de charge initial sans interruption.


Batterie	Charge minimale
Standard	3,5 heures minimum
Longue durée	7 heures minimum

- Connectez le câble de sortie d'alimentation secteur au connecteur d'alimentation SimplyGo Mini, en alignant les points verts situés sur le cordon d'alimentation et l'appareil(1).
- Branchez la prise du cordon d'alimentation secteur sur une sortie d'alimentation secteur (2).
- Débranchez l'alimentation secteur lorsque la charge est terminée.

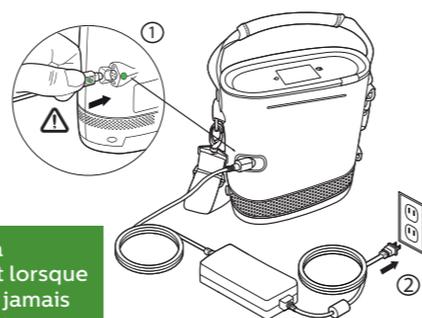

**Attention :** Retirez la batterie uniquement lorsque l'appareil est éteint, jamais lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

## 3. Utilisation de la sacoche de transport

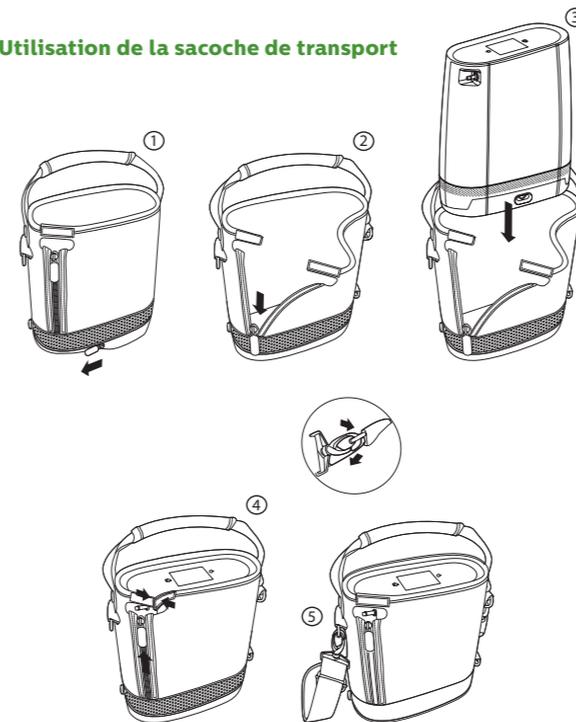

### Le SimplyGo Mini est fourni avec les accessoires suivants :

- Sacoche de transport à bandoulière
- Batterie rechargeable standard
- Alimentation électrique secteur avec cordon
- Alimentation électrique en courant continu
- Sac pour accessoires

Ce document est destiné aux professionnels.

Le concentrateur d'oxygène portable SimplyGo Mini est un appareil destiné aux patients pour lesquels une oxygénothérapie ou un supplément d'oxygène a été prescrit. L'appareil est petit, portable et peut être utilisé en continu à domicile, en institution et lors de voyages et déplacements. Cet appareil n'est pas destiné à servir de dispositif de maintien des fonctions vitales ou de survie et n'est pas destiné à être utilisé chez les nouveau-nés et les nourrissons. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consulter la LPPR. Ce dispositif médical de classe IIa est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE, dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.



© 2017 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.  
Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville PA 15668 - États-Unis  
Mandataire Européen (EC REP) : Philips Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - Allemagne  
Date de création : 18/04/2017  
PN 500261

www.philips.com